

# 歩くことをあきらめない歩行器


(利用者が一人で使用するものではありません。)

# たあ〜くん

オリジナル歩行器


## 立ち上がり時の使用方法

### 1. 前輪キャスターを左右ともにロックします。

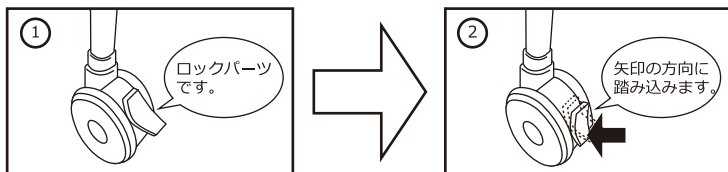

※ この時、歩行器本体が動かないように注意して操作してください。  
床面の状態による歩行器本体の誤動作で思わぬ事故の原因になる可能性があります。


### 2. 利用者にとっ手部を両手で握り、両肘を肘パッドに置くよう促します。

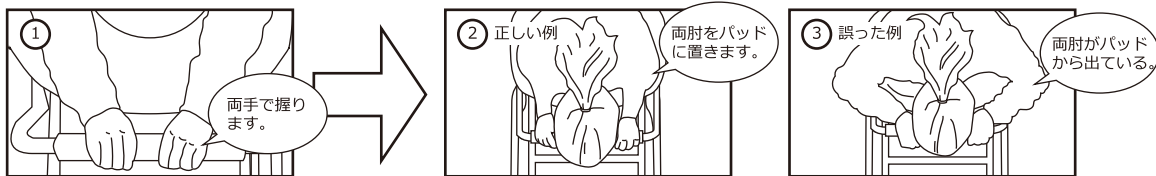


※ 肘パッドから両肘が出ないように注意してください。

### 3. 介護士と利用者の使用動作

利用者に肘パッドの中心に胸を付け、体重を肘パッドに乗せ前かがみになるよう促します。

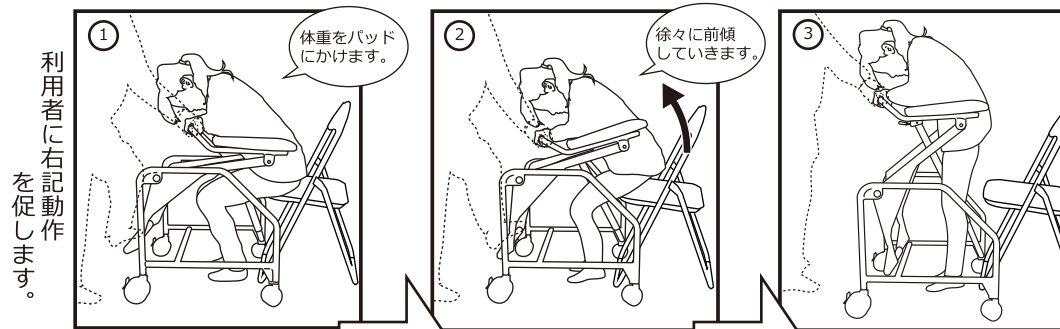


※ 体重をしっかり乗せない  
と利用者の腕のみが上がり、  
しっかり機能しないことが  
あります。

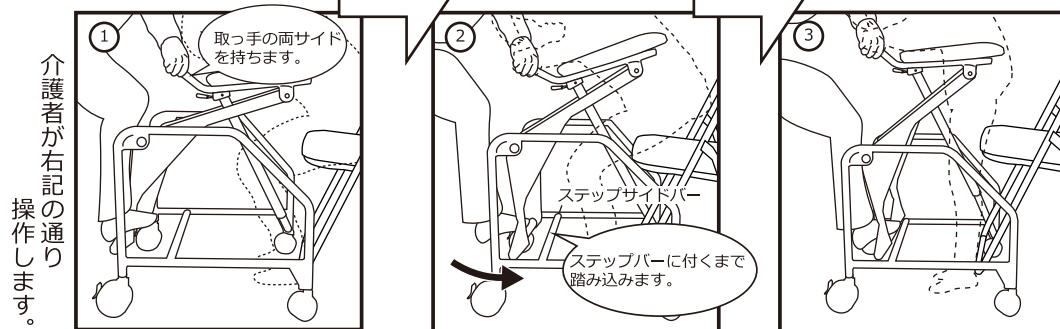


※ ステップバー踏み込み時、  
利用者の状況を確認しながら  
踏み込みましょう。

昇降レバーを握り、ロックをする事でたあ〜くん本体の揺れがなくなります。

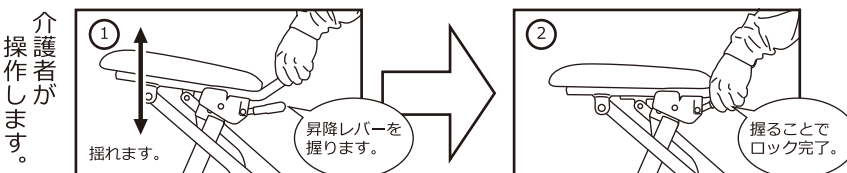

※ 利用者の状況を確認しながらロックしましょう。突然のロックは思わぬ事故の原因になる可能性があります。


### 4. 前輪キャスターのロックを左右ともに解除します。

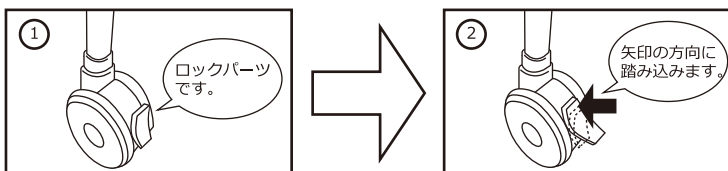

→ 裏面は着座時の使用方法です。

# 着座時の使用方法

1. 歩行器本体をベッドなどの側面にしっかりと付けて固定し、左右の前輪をロックします。

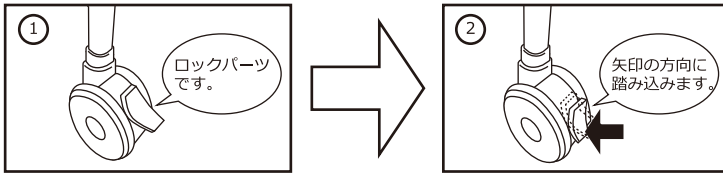


※ この時、歩行器本体が動かないように注意して操作してください。  
床面の状態による歩行器本体の誤動作で思わぬ事故の原因になる可能性があります。

2. 立ち上がり時の操作 2 を行い、利用者に肘パッドに体重を乗せてもらいます。


## 3. 介護士と利用者の使用動作

昇降レバーを握って本体が介護者側に傾いたら昇降レバーを離します。

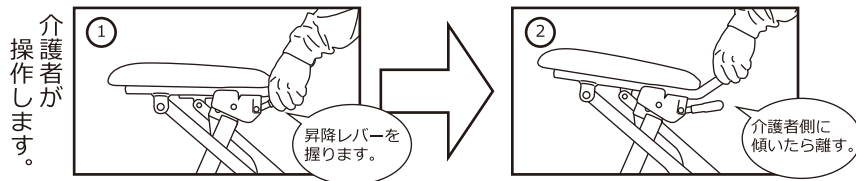


※ 利用者の状況を確認しながら操作しましょう。突然の昇降レバーの操作は思わぬ事故の原因になる可能性があります。

ゆっくりと押し込む様に下げていき奥まで座れた事を確認したら取っ手を離します。

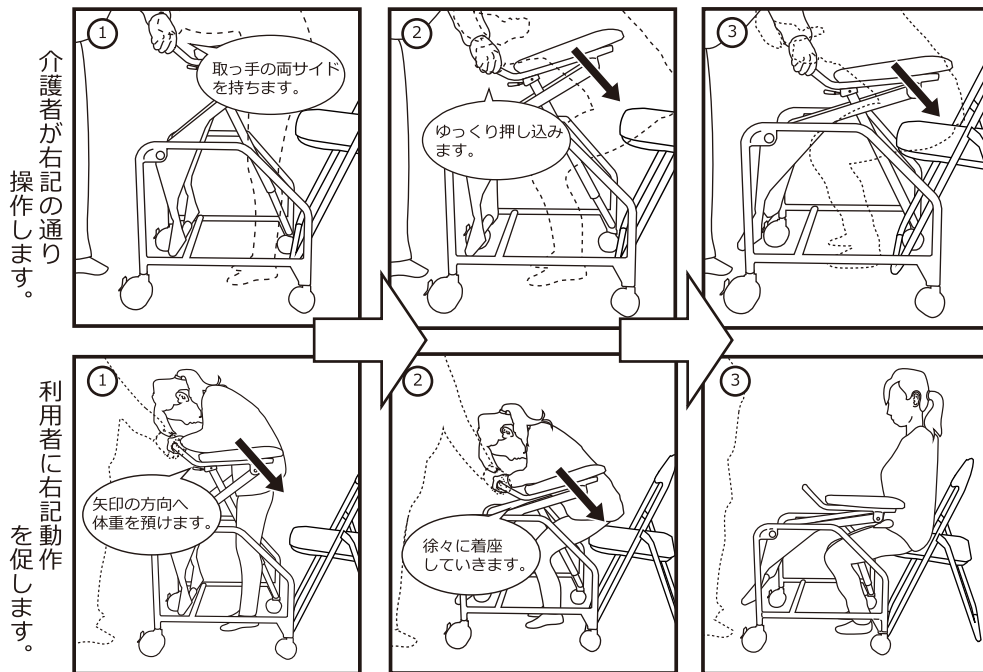


※注意

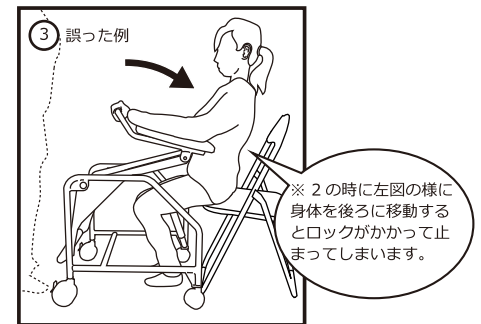

※ 利用者の方は図②のように前かがみになってください。介護者の押し込む力だけでは下がりにません。

4. 前輪キャスターのロックを左右ともに解除します。

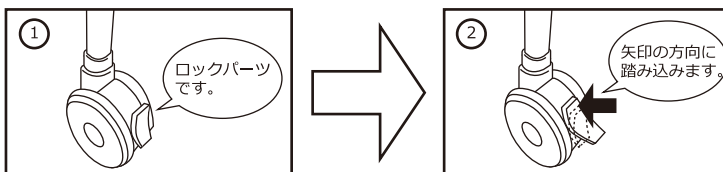

※ この時、歩行器本体が動かないように注意して操作してください。  
床面の状態による歩行器本体の誤動作で思わぬ事故の原因になる可能性があります。

**この商品は介護者目線の補助具であり、利用者が一人で使用する物ではありません。**

この取り扱い説明書は(株)津島鉄工所が製造・販売するたあ〜くん専用の物になります。  
目的以外の使用による破損・事故に関しまして弊社は責任を負いかねます。



お問い合わせは (株)津島鉄工所 TEL 0774-52-3397 まで

# 各部名称

---

